

Tratamentos para celulite com Cellureduce Celulite/Flacidez (utiizando aparelho)

Nº de aplicações: 15 a 24

Freqüência: 2 vezes por semana

Cabine

1. Aplicar **Body Polish** na região a ser tratada com movimentos circulares. Após a esfoliação remover o produto retirando as partículas esfoliantes.
2. Borrifar **CelluReduce Fluido Termoativo** nas áreas afetadas.
3. Aplicar **CelluReduce Lipodrenante** e realizar massagem até completa absorção. Aplique o produto na placa ativa para iontoforese e na placa inativa (que ficará do outro lado), umedecer com água filtrada. Ionizar na polaridade negativa por 10 minutos, dar um intervalo de 3 minutos e ionizar mais 10 minutos na polaridade positiva.
4. Finalizar com **CelluReduce Contour**.

Manutenção em casa

1. Aplicar **CelluReduce Contour** duas vezes ao dia.